

Halbstumpfe Aufziehkanülen für erhöhte Sicherheit in der Arzneimittelzubereitung

Sterican® Mix und Sol-M® Blunt Fill Needle



Handhabungshinweise

Handhabungshinweise

Halbstumpfe Aufziehkanülen

Die halbstumpfen Aufziehkanülen wurden so konzipiert, dass Aufziehen deutlich sicherer möglich ist. Der Kanülenschliff minimiert das Risiko von Ausstanzungen bei der Entnahme aus Vials und reduziert auch

beim Aufziehen von Lösungen und Medikamenten aus Glasampullen die Gefahr von Nadelstichverletzungen deutlich.



1 Setzen Sie die Aufziehkanüle auf eine Luer-Steck-Spritze. Sichern Sie durch festes Andrücken den korrekten Sitz. Bei Verwendung einer Luer-Lock-Spritze verbinden Sie diese mit einer leichten Drehbewegung.

2 Die Schutzkappe wird mit einer geraden Bewegung (ohne Drehen) von der Kanüle getrennt.

3 Für die Entnahme aus Vials punktieren Sie den Verschlussstopfen mittig durch senkrechtes Ansetzen der Kanüle. Beim Durchstechen sind Drehbewegungen zu vermeiden, um das Risiko von Ausstanzungen zu minimieren.

4 Entsorgen Sie die Aufziehkanülen unmittelbar nach der Anwendung in einen geeigneten Kanülen-Abwurfbehälter.

Produktbezeichnung	Gauge	Außen- \emptyset	Stichlänge	Farbe	Filter	Art.-Nr.	VE
Sterican® Mix	18	1,2 mm	40 mm	rot	–	4550400-01	100 Stück
Sol-M® Blunt Fill Needle NEU	18	1,2 mm	38 mm	rot/flieder	5 μ	110022F	100 Stück

Sol-M® ist eine Marke der Sol-Millennium Medical, Inc.