

## Aufbereitungsanleitung Steripower



**1. Schritt**  
Reinigen Sie den Sprühkanal durch Wischen mit einem Desinfektionsmittelgetränktem Tuch.



**2. Schritt**  
Prüfen Sie die Sprühsensoren auf optische Verschmutzungen.



**3. Schritt**  
Entfernen Sie sämtliche Desinfektionsmittelrückstände an der Düse und dem optischen Element.



**4. Schritt**  
Öffnen Sie die Fronthaube durch senkrecht ziehen und Kippen der Lasche an der Unterseite.



**5. Schritt**  
Reinigen Sie die Rückseite der Fronthaube durch manuelles Wischen.



**6. Schritt**  
Entfernen Sie die Auffangschale durch leichtes Drücken nach oben.



**7. Schritt**  
Tauschen Sie, je nach Anwendung, das verhärtete Medical Pad durch ein neues Pad aus (ca. alle 8 Wochen).



**8. Schritt**  
Stecken Sie die Auffangschale zurück an die Steripower-Rückwand.



**9. Schritt**  
Setzen Sie die Fronthaube gerade auf den Korpus und drücken Sie den unteren Teil leicht an, bis die Einrastung erfolgt.



**10. Schritt**  
Wischen Sie final die komplette Fronthaube mit einem Desinfektionsmittel-tuch ab.

Je nach Benutzung, sollte die Reinigung einmal wöchentlich erfolgen.

### Gerätebedienung:

1. Berührungsloses Einführen der Hände in den Sprühkanal, beide Handflächen nach oben geöffnet. Fingerspitzen nach oben angewinkelt.
2. Nach erfolgter Sensorerkennung werden die Handflächen automatisch mit Desinfektionsmittel flächendeckend besprüht.
3. Hände aus dem Gerät nehmen und die Flüssigkeit zur optimalen Eliminierung von Erregern je nach Einwirkzeit einreiben.