





		DATA SHEET	
 5-30°C  >94 		FAMEX FAGOMED FFP2 ATEMSCHUTZMASKE	
<small>CERTIFICATE</small> EN149:1001/A1:2009	<small>PROTECTION CLASS</small> FFP2	<small>ITEM NUMBER</small> FAGO S 101	 2814

FAMEX FAGOMED FFP2 Atemschutzmasken

- ✓ **Zuverlässig**
- ✓ **Sicher**
- ✓ **Zertifiziert**

Die FAMEX FAGOMED FFP2 Atemschutzmaske für hygienischen Schutz vor Partikeln, Tröpfchen und Aerosolen. Der Mund-Nasenschutz eignet sich aufgrund der hohen Filterleistung (> 94%) hervorragend für medizinisches Personal und Privatpersonen. Neben den hygienischen Maßnahmen bietet die FAMEX FAGOMED FFP2 Atemschutzmaske eine ergonomische Passform. Mittels des flexiblen Nasenflügels, lässt sich der Mundschutz individuell an den eigenen Nasensteg anpassen und sorgt für einen angenehmen, sicheren Sitz. Die elastischen Bänder verhindern ein Verrutschen der Maske, um das Risiko einer Infektion so gering wie möglich zu halten. Die FAMEX FAGOMED FFP2 Atemschutz-masken sind in einzelnen Folienbeuteln verpackt. Eine Gebrauchsanweisung in Deutsch ist Bestandteil jeder Verpackung.

FAMEX
PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKE
PARTICLE FILTERING HALF MASK

DE
 Hohe Filtrationseffizienz
 Niedriger Atemwiderstand
 Bequemer zu tragen

EN
 More Comfortable to Wear
 Low Respiratory Resistance
 High Filtration Efficiency

CE
 2841

5 LAGIG LAYERS

100% PREMIUM QUALITÄT

FAGOMED FFP2 NR
FAGO S 101
CE 2841
EN149:2001+A1:2009

20 STK / PCS

FFP2 NR
 EN149:2001+A1:2009

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den FAMEX FAGOMED FFP2 um Einmal-Masken handelt.

Alle Fakten auf einen Blick:

- Persönliche Schutzausrüstung für medizinisches Personal und Privatpersonen
- Zuverlässiger Schutz gegen Viren und Bakterien über Tröpfchen
- Individuelle Passform dank des flexiblen Nasenbügels
- Elastische Bänder bieten einen guten Halt
- Hygienisch einzeln verpackt
- In der Farbe schwarz
- Modell FAGO S 101
- Schutzklasse FFP2 EN149:1001 und A1:2009 FFP2 NR nach der CE-Zertifizierung 2814

1 Hände waschen und desinfizieren.

2 Klappen Sie die Maske auf.

3 Positionieren Sie die Maske, so dass Mund und Nase bedeckt sind.

4 Passen Sie die Ohrschlaufen so an, dass die Maske bequem sitzt.

5 Drücken Sie die Maske vorsichtig an die Nase für einen dichten Sitz.

6 Um den Sitz zu überprüfen, legen Sie beide Hände über die Maske und atmen Sie kräftig aus. Wenn Luft vom Ihre Nase strömt, drücken Sie den Clip fester. Wenn am Rand Luft austritt, positionieren Sie die Ohrschlaufen neu, um eine bessere Passform zu erzielen. Überprüfen Sie die Abdichtung erneut und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Maske gut abdichtet.

1 Wash and disinfect hands.

2 Unfold the mask.

3 Position the mask so that the mouth and nose are covered.

4 Adjust the ear loops so that the mask fits comfortably.

5 Gently press the mask to the nose for a snug fit.

6 To check the fit, place both hands over the mask and exhale forcefully. If air flows around your nose, press the clip harder. If air leaks around the edge, reposition the ear loops for a better fit. Recheck the seal and repeat the process until the mask seals well.

PRODUKTIONSdatum
PRODUCTION DATE
12/02/2021

MINDESTENS HALTBAR BIS
BEST BEFORE
12/02/2023

LOT F-003-2021-2-1-1

ISO 9001 :2015 (OMS)
ISO 14001 :2015 (EMS)
ISO 45001 :2018 (OHSMS)

Turkey Discover the potential

CE 2841

DE Warnung

- Nicht verwenden, wenn Konzentrationen von Schadstoffen unmittelbar gesundheitlich oder lebensgefährlich sind. Es besteht noch ein Warnhinweis vor dem Einsatz der Ausrüstung in explosionsfähiger Atmosphäre gegeben wird.
- Verlassen Sie den Arbeitsbereich sofort, wenn, a) das Atmen schwierig wird oder b) Schwindel oder andere Beschwerden auftreten.
- Ändern oder modifizieren Sie diese Atemschutzmaske niemals in irgendeiner Weise außer was in den Anweisungen angegeben ist.
- Die Nutzungsdauer dieser Atemschutzmaske hängt von den vorhandenen Verunreinigungen ab, sollte jedoch eine Schicht nicht überschreiten. Die Atemschutzmaske sollte früher ausgetauscht werden, wenn das Atmen schwierig wird.
- Der nicht richtige Sitz der Halbmaske kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.

Angemessene Verwendung
Professionelle / Staubschutz / Mikroorganismen Filtration

Bedingungen korrekte Base
Halten Sie die Atemschutzmaske in der Display bis zur Verwendung von direktem Sonnenlicht oder Verunreinigungen fern. Umgebungsbedingungen wie Temperatur zwischen -20° C bis +40° C und relative Luftfeuchtigkeit < 80%

Dauer der Haltbarkeit
Haltbarkeit beträgt zwei Jahre ab Produktionsdatum.

EN Warning

- Do not use if concentrations of harmful substances are immediately dangerous to health or life. There should still be a warning in the warnings about using the equipment in explosive atmospheres.
- Leave the work area immediately if, a) breathing becomes difficult, or b) dizziness or other discomfort occurs.
- Never alter or modify this respirator in any way (except as specified in the instructions).
- The period of use of this respirator depends on the impurities present, but should not exceed one shift. The respirator should be replaced earlier when breathing becomes difficult.
- Failure to fit the half mask properly can result in serious damage to health or death.

Appropriate use
Professional / dust protection / microorganism filtration

Conditions corrective base
Keep the respirator in the display box away from direct sunlight or contaminants until use. Ambient storage conditions such as temperature between -20° C to +40° C and relative humidity < 80%.

Shelf life duration
Shelf life is two years from production date

FAMEX

PARTIKELFILTRIERENDE HALBMASKE
PARTICLE FILTERING HALF MASK

1 5TK FFP2 NR

5 LAGIG LAYERS

100% PREMIUM QUALITÄT

FFP2 NR
EN149:2001+A1:2009

CE 2841

1 Hände waschen und desinfizieren.

2 Klappen Sie die Maske auf.

3 Positionieren Sie die Maske, so dass Mund und Nase bedeckt sind.

4 Passen Sie die Ohrschlaufen so an, dass die Maske bequem sitzt.

5 Drücken Sie die Maske vorsichtig an die Nase für einen dichten Sitz.

6 Um den Sitz zu überprüfen, legen Sie beide Hände über die Maske und atmen Sie kräftig aus. Wenn Luft vom Ihre Nase strömt, drücken Sie den Clip fester. Wenn am Rand Luft austritt, positionieren Sie die Ohrschlaufen neu, um eine bessere Passform zu erzielen. Überprüfen Sie die Abdichtung erneut und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Maske gut abdichtet.

1 Wash and disinfect hands.

2 Unfold the mask.

3 Position the mask so that the mouth and nose are covered.

4 Adjust the ear loops so that the mask fits comfortably.

5 Gently press the mask to the nose for a snug fit.

6 To check the fit, place both hands over the mask and exhale forcefully. If air flows around your nose, press the clip harder. If air leaks around the edge, reposition the ear loops for a better fit. Recheck the seal and repeat the process until the mask seals well.

PRODUKTIONSdatum
PRODUCTION DATE
12/02/2021

MINDESTENS HALTBAR BIS
BEST BEFORE
12/02/2023

LOT F-003-2021-2-1-1

Turkey Discover the potential

CE 2841

HERSTELLER
MANUFACTURER
FAGO MEDİKAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

DISTRIBÜTÖR / IMPORTÖR
LIFECOM Distribution GmbH
Elberfelder Str. 112
42853 Remscheid

Web: www.lifecom-gmbh.de
E-mail: support@lifecom-gmbh.de
Tel: 0049 101 69 153228 471

HERSTELLER
MANUFACTURER
FAGO MEDİKAL SAN. VE TIC. LTD. ŞTİ.

Web: www.fagomedikal.com
E-mail: info@fagomedikal.com
Tel: +90 212 630 67 55 - +90 212 630 67 56

15 Temmuz Mah. Cami Yolu Cad.
No. 106/21 Bağcılar - İstanbul - Türkiye

QR CODE

SCAN FOR CERTIFICATES